

Encuesta para HCG

Proveedor de EQA: ESfEQA GmbH
Heidelberg

Coordinador EQA: Dr. D. Groche

Instrucciones de uso

Notas:

Para estas muestras se aplican las precauciones habituales en el laboratorio para muestras potencialmente peligrosas. Se ha comprobado que las donaciones de sangre utilizadas para la producción no son reactivas al HBsAg, al anti-HIV 1/2 y al anti-HCV.

En ocasiones, es posible que se deleguen diversas tareas del programa de pruebas de competencia a subcontratistas cualificados. Sin embargo, ESfEQA es responsable ante los participantes del trabajo del subcontratista.

Los resultados de los análisis de muestras solo se podrán comunicar a colegas de otros laboratorios una vez concluido el período de pruebas.

Al registrarse y participar en este EQA, los participantes aceptan los términos y condiciones generales de ESfEQA GmbH. Estas se pueden consultar en línea en www.esfega.eu

1. Uso previsto

Las muestras están destinadas a ser utilizadas como material de control cualitativo para la evaluación externa de la calidad (EQA) en laboratorios médicos para el siguiente analito:

hCG cualitativo

2. Descripción del producto

Las muestras son material liofilizado a base de plasma humano.

3. Almacenamiento y Estabilidad

Las muestras deben conservarse en posición vertical a una temperatura de entre 2 y 8 °C. Son estables al menos hasta la fecha límite de presentación de datos que se indica en la etiqueta de la muestra.

Después de la reconstitución, las muestras son estables en viales bien tapados durante 10 días a 2-8 °C.

4. Preparación y análisis de muestras

Quitar el tapón de rosca del vial y pipetear exactamente 3 ml de agua destilada o desionizada en el liofilizado. Mantener la muestra de control durante unos 30 minutos en reposo en un lugar protegido de la luz y luego agitar suavemente el vial de vez en cuando hasta que el liofilizado se disuelva por completo.

Las muestras deben tratarse de la misma manera que las muestras de pacientes y analizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento y del reactivo.

5. Fechas y envío de los resultados de las pruebas

Periodos de prueba: consulte las etiquetas de las muestras. Los resultados se pueden enviar en cualquier momento dentro del periodo de prueba indicado en las etiquetas de las muestras.

Envíe sus resultados electrónicamente a ESfEQA en <https://tega.esfega.eu>

Si necesita ayuda con el registro en TEQA, póngase en contacto con su distribuidor local de programas ESfEQA o directamente con ESfEQA. Otra opción, aunque no es la preferida, es utilizar el formulario de resultados que se encuentra en el sitio web de ESfEQA. En ambos casos, indique el instrumento y el método utilizados para el análisis de las muestras.

6. Fecha límite para el envío de datos

Los plazos de presentación de los resultados se indican en las etiquetas de las muestras (zona horaria GMT +1).

7. Informes y Certificados

Los datos serán evaluados por ESfEQA. Los informes y certificados de cada laboratorio pueden consultarse en línea en <https://tega.esfega.eu>.